


## LOPARČEK ZA GINEKOLOŠKI BRIS

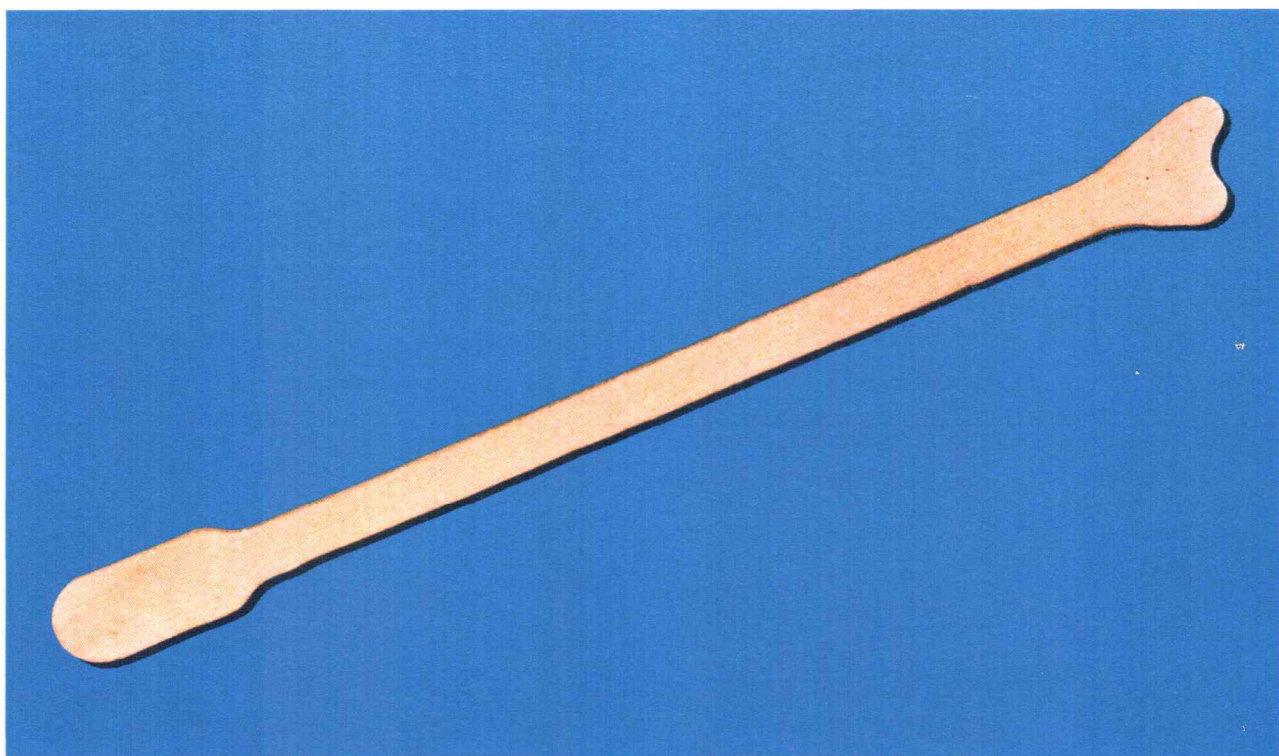

koda izdelka: 3030

**Namen uporabe:** Loparček za odvzem ginekološkega brisa je izdelan iz lesa ustrezne kakovosti. Služi za odvzem brisa z materničnega vratu (cervix). Pri ženskah prihaja namreč, v tem predelu, najpogosteje do rakastih tvorb, zato je kvaliteten in pravočasen bris velikega pomena pri diagnosticiranju in zgodnjem odkrivanju bolezenskih sprememb.

**Način uporabe:** Za odvzem brisa služita oba konca loparčka (srčasti in loparčasti del). Srčasti del služi za odvzem brisa z materničnega ustja, loparčasti del pa za odvzem brisa z zunanje strani materničnega vratu. Srčasti del pazljivo približate materničnemu ustju (daljši del postavite na vhod v maternico), ga zavrtite okoli svoje osi, vzamete iz telesa in celice odbrišete na namensko stekleno ploščico. Enak postopek ponovite z loparčastim delom, le da celice odzimate z zunanje strani materničnega vratu.

LOPARČKOV je v osnovni škatli 100 kosov. Transportna embalaža je narejena za 300, 500 in 1000 kosov.

Izdelek je **NESTERILEN** in namenjen za enkratno uporabo. Pred uporabo ga je potrebno sterilizirati, npr. s parno sterilizacijo (45-55 min, 140 - 150 °C).

Loparček je bil testiran na Ginekološki kliniki v Ljubljani.



**METALOPLAST** d.o.o. Kobarid  
Staro selo 47a  
5222 Kobarid  
tel/fax: 05 38 48 043  
05 38 93 039