


## ŠČETKA ZA GINEKOLOŠKI BRIS

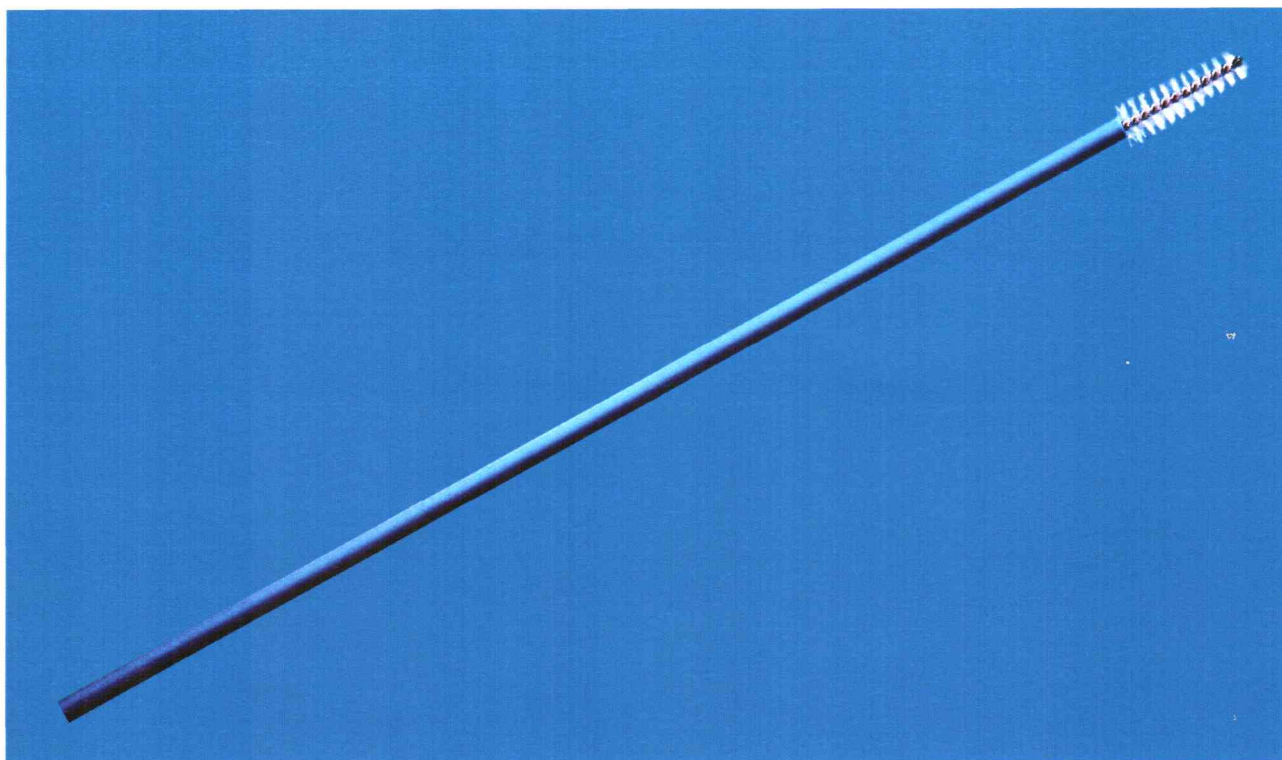

koda izdelka: 2220

**Namen uporabe:** Ščetka služi za odvzem brisa iz materničnega vratu (cervix uteri). Bris materničnega vratu je zelo uspešna metoda pri zgodnjem odkrivanju raka maternice. Z analiziranjem odvzetega brisa se ugotavlja morebitna obolenja ženskih rodil oz. spremembe celic.

**Način uporabe:** Ščetko primete za držalo, ko jo jemljete iz embalaže. Med jemanjem brisa ščetko vrtite okoli svoje osi, da lažje prodira skozi maternični vrat in obenem pobere čimveč celic za preiskavo. Ko ščetka doseže določeno globino v cervikalnem kanalu, jo je potrebno pazljivo vzeti iz telesa in odvzete celice odbrisati na namensko stekleno ploščico.

ŠČETKE so v vrečkah pakirane posamično, v osnovni škatli je 100 kosov. Transportna embalaža je narejena za 300, 500 in 1000 kosov.

Izdelek je sterilen in namenjen za enkratno uporabo.  
Ščetka je bila testirana na Ginekološki kliniki v Ljubljani.

CE 1304



**METALOPLAST** d.o.o. Kobarid  
Staro selo 47a  
5222 Kobarid  
tel/fax: 05 38 48 043  
05 38 93 039